

T-POINT

MEASURE YOUR TEMPERATURE



32,0 °C
37,0 °C



37,1 °C
37,5 °C



37,6 °C
40,0 °C


Der T-Point zur vorbeugenden Überwachung der Körpertemperatur, das für den Einsatz an einem festen Ort oder für den Durchgang vorgesehen ist.

Stellen Sie das Gerät in einem Raum mit einer Umgebungstemperatur zwischen 19 und 25 °C an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen auf. Ein Unterschied in der Umgebungstemperatur, der niedriger oder höher als der angegebenen ist, beeinträchtigt die korrekte Anzeige der Körpertemperatur. Das Gerät liest aus einer Entfernung von 50 cm. Das Messen von einer Körpertemperatur, die extern erhitzt wurde oder mit einer Brille verdeckt wird, kann dadurch beeinträchtigt werden. Das Gerät ist bei einer Temperatur ab 37 °C mit einem akustischen Signal ausgestattet. Der T-Point ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Bei 3 Messwerten über 37,5 °C, wird eine Überprüfung mit einem Kontaktthermometer für medizinische Zwecke empfohlen. Das Gerät zeigt die Werte in 3 verschiedenen Farben an. Wenn der Messwert niedrig ist, erscheint „LOW“ auf dem Display, wenn der Messwert zu hoch ist, erscheint „ERR“ auf dem Display. N.B. Im Falle von Anomalien eines thermischen Sensors erscheint die Anzeige weiß. Den T-Point nur mit einem feuchten Tuch reinigen.


INSTALLATION

- Befolgen Sie die Anweisungen zur Montage des Sockels
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen, Klimaanlage oder in der Sonne aufstellen
- Stellen Sie sicher, dass die Befestigung am Boden oder an der Wand stabil ist
- Stecken Sie den 5-Volt-Stecker in eine 110/220-50-Hz-Buchse
- Warten Sie einige Sekunden, bis der Bildschirm grün wird
- Um zuverlässigere Messungen zu erhalten, wird empfohlen nach dem Einschalten 30 Minuten zu warten, damit sich die Sensoren an die Umgebungstemperatur angepasst haben

STROMVERSORGUNG 5-Volt enthalten
GRÖSSE OHNE SOCKEL 180x50x30 cm
GRÖSSE MIT SOCKEL 200x50x30 cm
GEWICHT 7,5 kg

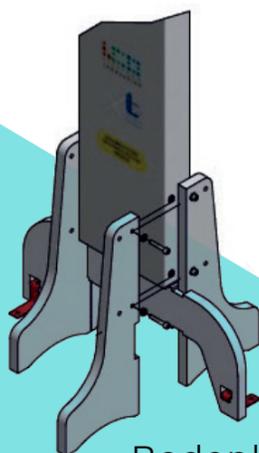

Bodenbefestigung

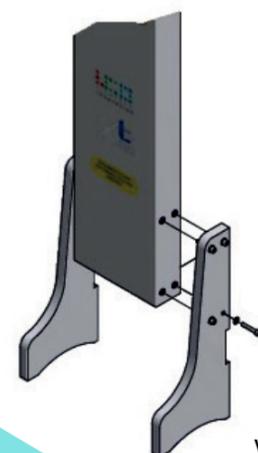

Wandbefestigung

